

Tabelas para Odontologia

As tabelas servem apenas como referência, deve-se ajustar os valores como o equipamento utilizado no local. No caso específico do equipamento utilizado no local deve-se ajustar para que o valor máximo seja de _____s..

Tabela de técnica radiográfica para equipamento marca GNATUS

REGIÃO	ÂNGULO (°)	TEMPO
MAXILAR		
Incisivo	+40	0,3 - 0,4
Canino	+45	0,3 - 0,4
Pré-Molar	+30	0,4 - 0,5
Molar	+20	0,5 - 0,6
MANDÍBULA		
Incisivo	-15	0,3 - 0,4
Canino	-20	0,3 - 0,4
Pré-Molar	-10	0,4 - 0,5
Molar	-5	0,4 - 0,5
BITEWING		
Anterior	+8	0,3 - 0,4
Posterior	+8	0,3 - 0,4
OCLUSAL		
Maxilar Superior	+60	0,5 - 0,6
Maxilar Inferior	-70	0,4 - 0,5

Procedimentos para Revelação com Reagentes Químicos Recentes

Temperatura Revelação (°C)	18 - 20	21 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31
Tempo Revelação (min)	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0

Tabela Tentativa Revelação com Reagentes Químicos

Temperatura (°C)	Químico	Tempo Revelação (s)	Qualidade da Imagem
35	Novo	40	Ruim, pouco revelado. Tentar tempo maior.
35	Novo	60	Bom
35	Velho	80	Ruim, muito revelado. Tentar tempo menor.
35	Velho	70	Bom
Passar resultado bom para uma tabela definitiva			
28			
27			
26			